

# Ectodol®

## Pastillas para chupar

### **Ectodol® pastillas para chupar**

Lea detenidamente esta información antes de empezar a usar **Ectodol® pastillas para chupar**. NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO; contienen información importante. Si tiene alguna duda acerca del uso de **Ectodol® pastillas para chupar** consulte con su médico, farmacéutico o con el distribuidor detallado en estas Instrucciones de Uso.

### **1. Qué es Ectodol® pastillas para chupar y para qué se utiliza**

**Ectodol® pastillas para chupar** es un producto sanitario que combina los efectos positivos de la sal marina natural con Ectoin®, una molécula que protege las células, con propiedades reductoras de la inflamación y estabilizadoras de la membrana.

**Ectodol® pastillas para chupar** son pastillas para chupar con sabor salado y agradable aroma a miel para el tratamiento y prevención de los síntomas del resfriado común, boca y garganta seca, y voz ronca o afonía debido a un uso excesivo de la voz. La espesa y compacta mucosidad se disuelve gracias a las pastillas saladas para chupar.

**Ectodol® pastillas para chupar** forma una barrera protectora llamada "Ectoin® Hydro Complex" sobre las membranas mucosas de la boca y la garganta sin dejar sensación viscosa. La barrera protectora estabiliza las membranas reduciendo el riesgo de infecciones bacterianas o víricas en la boca y la garganta.

**Ectodol® pastillas para chupar** incrementa la producción de saliva y reduce la inflamación de las membranas mucosas de la boca y la garganta. De esta manera, **Ectodol® pastillas para chupar** alivia el dolor de garganta, el dolor al tragar y la voz ronca o afonía. Además, **Ectodol® pastillas para chupar** hidrata las membranas mucosas secas e irritadas y favorece su regeneración.

**Ectodol® pastillas para chupar** previene y reduce las irritaciones de las membranas mucosas en caso de, por ejemplo, voz fatigada, voz ronca o sequedad bucal debido a un uso excesivo de la voz, alérgenos o ambientes secos por calefacción, aire frío, aire acondicionado, humo de tabaco, etc. Los efectos de **Ectodol® pastillas para chupar** se consiguen con el uso de ingredientes 100% naturales. No contiene conservantes.

### **2. Advertencias y precauciones**

- **Ectodol® pastillas para chupar** no debe usarse en caso de lesiones persistentes, por ejemplo, después de cirugía o heridas en la boca.
- **Ectodol® pastillas para chupar** no debe usarse en niños menores de 6 años.
- No tome las pastillas mientras esté tumbado, por ejemplo, en la cama, debido a riesgo de asfixia.
- No tome las pastillas si el blíster está dañado o perforado.

### **3. Qué necesita saber antes de empezar a usar Ectodol® pastillas para chupar**

No existen datos disponibles sobre interacciones entre **Ectodol® pastillas para chupar** y otras pastillas, productos sanitarios o fármacos orales.

### **4. Qué debe tenerse en cuenta durante el embarazo y la lactancia**

Actualmente no existen datos disponibles sobre el uso de **Ectodol® pastillas para chupar** durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este producto sanitario si:

- está embarazada o en periodo de lactancia
- no está segura de si está embarazada o no

## 5. Cómo usar Ectodol® pastillas para chupar

Deje disolver lentamente 1 pastilla en la boca cada 3 horas o cuando se requiera.

**Ectodol® pastillas para chupar** no debe usarse en caso de hipersensibilidad a Ectoin® o a cualquiera de los demás ingredientes de estas pastillas.

Si se produce una reacción alérgica, debe interrumpirse inmediatamente el uso de **Ectodol® pastillas para chupar**.

## 6. Posibles efectos adversos de Ectodol® pastillas para chupar

**Ectodol® pastillas para chupar** presenta una buena tolerancia. Hasta la fecha no se conocen efectos adversos que aparezcan de forma frecuente o persistente. En muy raras ocasiones, una toma excesiva del producto puede producir un ligero efecto laxante debido al ingrediente isomaltosa.

Informe a su médico, farmacéutico o distribuidor (detallado en estas Instrucciones de Uso), si nota algún efecto adverso que pueda estar asociado al uso de **Ectodol® pastillas para chupar**.

Si la condición persiste o empeora, contacte con su médico o farmacéutico.

## 7. Cómo conservar Ectodol® pastillas para chupar

La fecha de caducidad de **Ectodol® pastillas para chupar** está indicada en la caja y en el envase.

**Ectodol® pastillas para chupar** no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada.

**Ectodol® pastillas para chupar** debe conservarse entre 2 °C – 25 °C en un lugar seco.

**Ectodol® pastillas para chupar** debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

## 8. Contenido de Ectodol® pastillas para chupar e información adicional

Cada caja contiene 3 blísters con 8 pastillas (24 pastillas por caja).

### Ingredientes

Ectoin®, sal marina, isomaltosa, sucralosa, aroma a miel (contiene triacetato de glicerol y propilenglicol), extracto de cártamo, agua.

## 9. Titular de la Autorización de Comercialización y Responsable de la fabricación

 bitop AG  
Stockumer Str. 28,  
58453 Witten (Alemania)



### Distribuido en España por:

BRILL PHARMA, S.L.  
C/ Munner, 10  
08022 Barcelona (España)  
[www.brillpharma.com](http://www.brillpharma.com)

## 10. Fecha de revisión: Mayo 2017

Marcado CE



Fecha de caducidad



Fabricante



Limitación de temperatura



Número de lote



No utilizar si el blíster está dañado o perforado



Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso



Conservar en un lugar seco



Precaución, consulte las instrucciones de uso (para advertencias/precauciones importantes)



 **brill**  
P H A R M A