

Instrucciones de uso

Lea las instrucciones de uso detenidamente, porque contienen información importante para usted.

Conserve estas instrucciones de uso ya que puede tener que volver a leerlas. Si necesita consejo o más información, consulte a su médico o farmacéutico. Debe consultar a un médico si sus síntomas empeoran o no mejoran.

EvoTears®

**Para la lubricación de ojos secos e irritados
Estabilización de la película lagrimal y
alivio de los síntomas de los ojos secos**

**Colirio estéril, sin conservantes y
libre de fosfatos**

¿Qué es EvoTears® y para qué se utiliza?

EvoTears® es un colirio en solución, no acuoso y sin conservantes.

EvoTears® contiene perfluorohexiloctano (EyeSol®) como único componente.

EvoTears® lubrica la superficie ocular, estabiliza la película lagrimal y alivia los síntomas asociados al ojo seco.

¿Qué necesita saber antes de empezar a usar EvoTears®?

No use EvoTears® si es hipersensible (alérgico) al componente perfluorohexiloctano.

Tenga especial cuidado con el uso de EvoTears® si está utilizando otros productos oftálmicos. Si está utilizando otros productos oftálmicos, debería cumplirse un intervalo de 15 minutos entre aplicaciones. En ese caso, EvoTears® debe aplicarse en último lugar. No debe usar EvoTears® si utiliza lentes de contacto ya que no hay datos disponibles relativos a la compatibilidad de EvoTears® con los materiales de las lentes de contacto.

Uso en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y en niños:


No se recomienda el uso de EvoTears® en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni en niños debido a la falta de datos de seguridad.

¿Cómo usar EvoTears®?


A menos que su médico o farmacéutico le recomiende lo contrario, aplique 1 gota en el párpado inferior hasta 4 veces al día. En caso necesario, puede utilizar EvoTears® a diario.

Las propiedades especiales de EvoTears® hacen que su aplicación en el ojo sea diferente a la de los colirios convencionales. Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar EvoTears®.

1. Lávese las manos antes de su aplicación.
2. Desenrosque el tapón del envase y quite el anillo de cierre antes de usar EvoTears® por primera vez.
3. Evite todo tipo de contacto con la punta del envase después de quitar el tapón.
4. **Para una correcta aplicación de EvoTears®, por favor lea los puntos 5 y 6 y siga los pasos descritos tal como se indica.**
5. Mantenga el envase abierto con la punta hacia arriba y presiónelo ligeramente.
6. **Antes de aplicarse el colirio en el ojo, gire la punta hacia abajo manteniendo presionado el envase, y a continuación deje de presionar el envase.** De este modo entrará aire en el envase a través del líquido. Mantenga el envase en esta posición, es decir, con la punta hacia abajo.
7. Incline la cabeza ligeramente hacia atrás y tire suavemente del párpado inferior hacia abajo mirando hacia arriba.

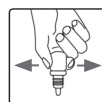

8. Mantenga el envase hacia abajo en posición vertical sobre el ojo. Presione suavemente y aplique una gota en cada ojo.

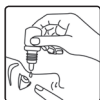

- Nota: debido a las propiedades especiales de EvoTears[®], puede que no note la gota en el ojo. Por este motivo, recomendamos su aplicación delante de un espejo.
9. No toque la punta del envase con el ojo ni con las pestañas.
10. Para una distribución uniforme de EvoTears[®], cierre los ojos después de la aplicación.
11. Tras la aplicación, cierre de nuevo el envase con el tapón.

EvoTears[®] puede aplicarse hasta 6 meses después de su apertura.

Posibles efectos adversos con el uso de EvoTears[®]

Se han notificado casos individuales de irritación ocular temporal tales como ardor, picor o enrojecimiento en los ojos tras la aplicación de EvoTears[®] que pueden ser un indicio de reacción alérgica. Si experimenta una irritación ocular persistente, suspenda el tratamiento y consulte a su médico o farmacéutico.

Otras indicaciones:

No use EvoTears[®] si el envase o el cierre original están dañados (☹).

Anote la fecha de apertura en la caja.

No utilice EvoTears[®] tras finalizar la fecha de caducidad impresa (📅).

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No ingerir el líquido.

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

El producto se encuentra disponible en los siguientes formatos:

Envase de 3 ml.

Muestra no destinada a la venta:

Envase de 1 ml.

Para una mejor manipulación, los colirios se envasan en envases de 5 ml y se llenan aproximadamente hasta la mitad. El proceso de envasado se realiza bajo un control permanente para evitar un llenado del envase por debajo del mínimo.

Fecha de revisión del texto:

Octubre 2017

Fabricante (🏭):

Novaliq GmbH

Im Neuenheimer Feld 515

69120 Heidelberg, Alemania

Distribuidor en España:

BRILL PHARMA, S.L.

Munner, 10

08022 Barcelona

Tel.: +34 934 170 911

CE 0483

STERILE A

Distribuidor:

BRILL PHARMA, S.L.

Munner, 10, 08022 Barcelona - Tel.: +34 934 170 911

brill
PHARMA