

# Ectodol®

## Lavado nasal

### Ectodol® lavado nasal

Lea detenidamente esta información antes de empezar a usar **Ectodol® lavado nasal**. NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO; contienen información importante. Si tiene alguna duda acerca del uso de **Ectodol® lavado nasal** consulte con su médico, farmacéutico o con el distribuidor detallado en estas Instrucciones de Uso.

#### 1. Qué es Ectodol® lavado nasal y para qué se utiliza

**Ectodol® lavado nasal** es un producto sanitario que contiene Ectoin®, una molécula de origen natural que protege las células, con propiedades reductoras de la inflamación y estabilizadoras de la membrana.

El lavado nasal está diseñado para el tratamiento y prevención de los síntomas de rinitis o rinosinusitis. Reduce la inflamación de la mucosa nasal alterada, y alivia los síntomas típicos como la irritación y la sequedad de la mucosa nasal, estornudos, picazón, congestión y formación de costra.

**Ectodol® lavado nasal** reduce las acciones nocivas de los alérgenos y partículas del aire, y favorece la regeneración de la mucosa nasal irritada.

**Ectodol® lavado nasal** es una solución ligeramente hipertónica. Limpia suavemente y humidifica la cavidad nasal, previene la deshidratación y ayuda a descongestionar la mucosa nasal de forma natural, favoreciendo la respiración. **Ectodol® lavado nasal** no contiene conservantes, es apto para niños y para narices sensibles, y puede usarse a diario.

#### 2. Advertencias y precauciones

- **Ectodol® lavado nasal** no debe usarse en casos de hipersensibilidad a Ectoin® o a cualquiera de los ingredientes de este lavado nasal.
- Si se produce una reacción alérgica, debe interrumpirse inmediatamente el uso de **Ectodol® lavado nasal**.

#### 3. Qué necesita saber antes de empezar a usar Ectodol® lavado nasal

No hay datos disponibles sobre las interacciones entre **Ectodol® lavado nasal** y otros tratamientos tópicos nasales.

#### 4. Cómo usar Ectodol® lavado nasal

Utilice siempre **Ectodol® lavado nasal** según estas Instrucciones de Uso. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico antes de usarlo. Las personas que no pueden utilizar **Ectodol® lavado nasal** por sí mismas, deben recibir ayuda durante la aplicación. Aplicar **Ectodol® lavado nasal** en cada fosa nasal 2-6 veces al día, a menos que su médico le indique lo contrario.

**Ectodol® lavado nasal** se puede utilizar en cualquier ángulo y tiene un boquilla específicamente diseñada para narices delicadas.

##### *Adultos y niños a partir de 11 años:*

1. Suénese la nariz suavemente para limpiar las fosas nasales antes de usar **Ectodol® lavado nasal**.
2. Retire el tapón.
3. Mantenga la cabeza en posición vertical.
4. Introduzca la boquilla en una fosa nasal, presione la boquilla hacia abajo para liberar la pulverización.
5. Retire la boquilla.
6. Opcional: presione suavemente con el dedo la fosa nasal tratada.
7. Repita el procedimiento en la otra fosa nasal.
8. Suénese la nariz.
9. Limpie la boquilla con agua templada y séquela.
10. Coloque el tapón en el envase.

##### *Bebés a partir de 1 mes y niños menores de 11 años:*

1. Tumbé al niño o que se siente con la cabeza en posición vertical.
2. Limpie la nariz con un pañuelo.
3. Retire el tapón.
4. Inserte suavemente la boquilla en la fosa nasal, presione la boquilla hacia abajo para liberar la pulverización.
5. Retire la boquilla.
6. Opcional: presione suavemente con el dedo la fosa nasal tratada o que lo haga el niño, si está capacitado.
7. Asegúrese de que el exceso de solución haya salido de la fosa nasal y limpie la nariz con un pañuelo.
8. Repita estos pasos en la otra fosa nasal.
9. Limpie la boquilla con agua templada y séquela.
10. Coloque el tapón en el envase.

Para garantizar la higiene, cada envase de ducha nasal debe ser utilizado por una sola persona.

## 5. Posibles efectos adversos de Ectodol® lavado nasal

Ectodol® lavado nasal presenta una buena tolerancia. Hasta la fecha no se conocen efectos adversos que aparezcan de forma frecuente o persistente.

Informe a su médico, farmacéutico o distribuidor (detallado en estas Instrucciones de Uso), si nota algún efecto adverso que pueda estar asociado al uso de Ectodol® lavado nasal.

Si la condición persiste o empeora, contacte con su médico o farmacéutico.

## 6. Cómo conservar Ectodol® lavado nasal

La fecha de caducidad de Ectodol® lavado nasal está indicada en la caja y en el envase.

No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada.

Ectodol® lavado nasal debe conservarse entre 2 °C-25 °C.

## 7. Contenido de Ectodol® lavado nasal e información adicional

Envase de 100 ml

### Ingredientes

Ectoin®, agua marina y agua purificada

## 8. Titular de la Autorización de Comercialización y Responsable de la fabricación

 Bitop AG  
Stockumer Str. 28,  
58453 Witten (Alemania)

### Distribuido en España por:

BRILL PHARMA, S.L.  
C/ Munner, 10  
08022 Barcelona (España)  
[www.brillpharma.com](http://www.brillpharma.com)

## 9. Fecha de revision: Mayo 2017

Marcado CE



Fabricante



Por favor, tenga  
en cuenta las  
instrucciones  
de uso



Número de lote



Fecha de  
caducidad



Limitación de  
temperatura

