

PARPAfresh®

Toallitas estériles para la limpieza y desinfección de la zona periorcular

Las toallitas estériles PARPAfresh® están impregnadas de una solución natural formulada específicamente para el uso periorcular, con pH isolagrimal y con características limpiadoras, emolientes y que normalizan la carga bacteriana cutánea.

Propiedades: PARPAfresh® no contiene perfumes que puedan causar reacciones alérgicas en personas especialmente sensibles. PARPAfresh® permite una limpieza suave con sensación de frescor, la eliminación de las secreciones mucosas y de las descamaciones secas o grasas que se depositen en el borde palpebral, y la normalización de la carga bacteriana, que puede evitar progresivamente la formación de nuevas secreciones.

PARPAfresh® puede usarse tanto en adultos como en niños.

Modo de uso: Abrir el sobre rasgando por la muesca de apertura. Extraer la toallita con las manos limpias y aplicar delicadamente la toallita sobre la superficie de los párpados y de la zona periorcular procurando mantener el ojo cerrado. Repetir la aplicación varias veces para favorecer la completa eliminación de las secreciones oculares y los posibles depósitos de otro tipo (partículas, polvo, maquillaje, etc.).

En caso de secreciones muy secas y resistentes, se recomienda repetir el tratamiento más veces, manteniendo la toallita durante unos segundos sobre la zona afectada, a modo de apósito, para que realice totalmente su acción emoliente,

- ✓ Sin conservantes
- ✓ pH isolagrimal
- ✓ Uso externo



con el fin de ablandar las secreciones y que éstas se desprendan más fácilmente sin molestias.

Dado que el producto no debe entrar en contacto con la zona intraocular, también puede ser utilizado por usuarios de lentes de contacto y durante el período pre y postoperatorio en caso de cirugías oculares. Las toallitas son estériles y pueden entrar en contacto con la piel dañada por heridas o abrasiones.

Composición: glicerol vegetal, extracto glicólico de Aloe ferox, extracto glicólico de Malva sylvestris, extracto hidroglicérico de Citrus grandis (extracto de semillas de pomelo), cocamidopropil betaína, fosfato de potasio monobásico, fosfato de potasio dibásico, EDTA disódico, agua purificada.

Advertencias: Solo para uso cutáneo. No aplicar directamente en los ojos. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y seco.

Periodo de validez: 24 meses.

Fabricante: Oftalparma S.r.l.
Via di Gonfienti 5/c/59 - Prato (Italia)

Distribuido en España por:
BRILL PHARMA, S.L.
C/ Munner, 10
08022 Barcelona (España)

Brill pharma

PARPAfresh®

Toalhitas estéreis para a limpeza e desinfeção da zona periocular

As toalhitas estéreis PARPAfresh® são toalhitas embebidas numa solução natural formulada especificamente para uso periocular, de pH isolacrimonial e com características detergentes, emolientes e normalizantes da carga bacteriana cutânea.

Propriedades: PARPAfresh® não contém perfumes que podem causar reações alérgicas em pessoas especialmente sensíveis. PARPAfresh® permite uma limpeza delicada acompanhada por uma sensação de frescura, a remoção das secreções mucosas e das decamações secas ou gordurosas que se depositam na borda das pálpebras e, y uma normalização da carga bacteriana, que pode evitar progressivamente a nova formação de secreções.

PARPAfresh® pode ser utilizado tanto em adultos como em crianças.

Modo de utilização: Abra a saqueta rasgado pelo entalhe de abertura. Retire a toalhita com as mãos limpas e aplique delicadamente a toalhita pela superfície da pálpebra e da zona periocular tendo o cuidado de manter o olho fechado, repetindo a passagem várias vezes para favorecer a remoção completa das secreções oculares e possíveis depósitos de outro tipo (poeira, pós, maquilhagem, etc.).

No caso de secreções particularmente resistentes e secas, recomenda-se que repita várias vezes o tratamento, deixando a toalhita durante alguns segundos sobre a zona em causa, como emplastro local, até que a ação

- ✓ Sem conservantes
- ✓ pH isolacrimonial
- ✓ Uso externo

CE 0373
Dispositivo Médico



emoliente atue por completo, a fim de amolecer as secreções e poder, depois, removê-las facilmente e sem complicações.

Dado que o produto não deve entrar em contacto com a zona intraocular, pode também ser utilizado por utilizadores de lentes de contacto e para a limpeza da zona das pálpebras durante o período pré e pós-operatório no caso de cirurgias oculares. As toalhitas são estéreis e podem igualmente entrar em contacto com a pele danificada por feridas ou escoriações.

Composição: glicerol vegetal, extrato glicólico de Aloe ferrox, extrato glicólico de Malva sylvestris, extrato hidroglicérico de Citrus grandis (extrato de sementes de toranja), cocoamidopropil betaina, fosfato de potássio monobásico, fosfato de potássio dibásico, EDTA dissódico, água depurada.

Advertências: Apenas para uso cutâneo. Não aplicar diretamente nos olhos. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Conservar em local fresco e seco.

Validade: 24 meses.

Fabricante: Oftalparma S.r.l.
Via di Gonfienti 5/c/59 - Prato (Itália)

Distribuído em Portugal por:

BRILL PHARMA UNIP, LDA
Av. D. João II, Lote 1.13.01, Loja L/N,
3º Piso, 1990-078 Lisboa (Portugal)

Brill pharma