

Instrucciones de uso

Por favor lea esta información con atención.

Le será útil para aplicar HYLO FRESH® correctamente.

HYLO FRESH®

Hialuronato de sodio 0,3 mg/ml

Para el alivio de la irritación ocular.

Colirio estéril, libre de fosfatos y sin conservantes.

¿Qué es HYLO FRESH®?

HYLO FRESH® es una solución estéril sin conservantes y libre de fosfatos para uso ocular.

Composición:

1 ml de HYLO FRESH® contiene 0,3 mg de hialuronato de sodio, eufrasia, ácido bórico, bórax y agua para inyecciones.

¿Para qué se usa HYLO FRESH®?

Para el alivio de la irritación ocular.


¿Cuándo debe aplicarse HYLO FRESH®?

HYLO FRESH® se utiliza para el alivio de la irritación ocular. Los ojos secos e irritados pueden ser el resultado del trabajo prolongado frente al ordenador, de las condiciones ambientales adversas como ambiente seco, corrientes de aire, radiación solar elevada, polución (polvo, polen, etc.), o debido al uso de lentes de contacto. Durante cientos de años, los preparados de eufrasia (*Euphrasia officinalis*) se han utilizado tradicionalmente para el tratamiento de la irritación de la conjuntiva en ojos rojos y con ardor, para el aumento de la secreción de lágrimas, y para la inflamación y el enrojecimiento de los párpados o márgenes de los párpados. HYLO FRESH® contiene hialuronato de sodio. El hialuronato de sodio aumenta la viscosidad de la solución humectante haciéndola más densa que el agua. Por lo tanto, permanece más tiempo en la superficie del ojo. La aplicación del colirio alivia los ojos y los párpados irritados y proporciona una humectación similar a la de las lágrimas naturales. Permite tratar los síntomas causados por la sequedad de la superficie del ojo, por ejemplo, cuando el ojo no produce suficientes lágrimas naturales. HYLO FRESH® se utiliza para la humectación de los ojos incluso durante el uso de lentes de contacto.

HYLO FRESH® no contiene conservantes, por lo que en general es bien tolerado. Además está libre de fosfatos, evitando así posibles complicaciones debidas a la formación de precipitados en la córnea.


¿Cómo debe aplicarse HYLO FRESH®?

Use HYLO FRESH® únicamente si el precinto de la caja está intacto antes del primer uso (☉).

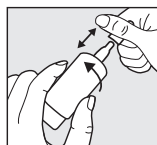


Paso 1

Retire el tapón antes de cada aplicación sujetando el tapón con una mano y realizando a la vez un movimiento giratorio con la mano que sujeta el envase. Antes de la primera aplicación de HYLO FRESH®, mantenga verticalmente el envase con la punta hacia abajo y presione la base hasta que aparezca la primera gota en la boquilla. Ahora el envase está listo para su uso.

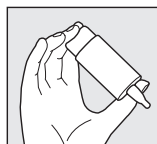

Paso 2

Mantenga el envase con el gotero hacia abajo, de forma que el pulgar presione el hombro del envase y el resto de los dedos se sitúen en la base.

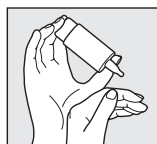


Paso 3

Apoye la mano con la que está sosteniendo el envase COMOD® sobre la que está libre, tal como se representa.



Paso 4

Incline la cabeza un poco hacia atrás, tire suavemente hacia abajo del párpado inferior y presione con fuerza y rápidamente la base del envase. De esta forma se activa el mecanismo para la liberación de una gota. Gracias a la tecnología especial de la válvula del sistema COMOD®, el tamaño y la velocidad de la gota son idénticos, independientemente de la presión que se ejerza. Cierre lentamente los ojos para que el líquido se distribuya de forma homogénea sobre la superficie del ojo.

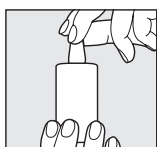

Paso 5

Tras la aplicación, coloque inmediatamente el tapón. Compruebe que la punta del gotero está seca. Durante la aplicación, evite el contacto de la punta del envase con el ojo o la piel.

El envase COMOD® contiene 10 ml de solución, lo que equivale a 300 gotas aproximadamente. Por razones técnicas, siempre queda un pequeño resto en el envase.

HYLO FRESH® puede utilizarse durante un periodo de tiempo ilimitado.

Cada envase de HYLO FRESH® debe ser utilizado por una única persona.

Otras indicaciones a tener en cuenta en la aplicación

Si está utilizando otros colirios, espere al menos 30 minutos entre las aplicaciones de los mismos. En ese caso, HYLO FRESH® deberá ser siempre el último en aplicarse. Sin embargo, las pomadas oftálmicas siempre deben administrarse después de usar HYLO FRESH®.

Debido a que HYLO FRESH® no contiene conservantes, puede utilizarse durante largos periodos de tiempo. En muy raras ocasiones, se han descrito reacciones de hipersensibilidad como escozor o lagrimeo excesivo, que desaparecieron inmediatamente tras la supresión de HYLO FRESH®.

HYLO FRESH® es compatible con lentes de contacto. Después de ponerse las lentes de contacto y antes de aplicar el colirio, se recomienda esperar unos 30 minutos para evitar posibles reacciones de incompatibilidad entre los productos que se utilizan para el mantenimiento de las lentes de contacto e HYLO FRESH®.

Según datos actuales, HYLO FRESH® puede aplicarse en niños y en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.


¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo puede aplicarse HYLO FRESH®?

HYLO FRESH® debería utilizarse de acuerdo a las instrucciones recibidas por su oftalmólogo o especialista en lentes de contacto. En general, se aplica una gota de HYLO FRESH® tres veces al día en el saco conjuntival. Si fuera necesario, podría utilizarse con más frecuencia. En caso de que tuviera que aplicar HYLO FRESH® más de 10 veces al día, consulte a su oftalmólogo. HYLO FRESH® es apto para tratamientos a largo plazo. No obstante, si las molestias persisten debe consultar a su oftalmólogo.

¿Cuándo no debe aplicarse HYLO FRESH®?

HYLO FRESH® no debería aplicarse en casos de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Indicaciones para la conservación de HYLO FRESH®

No conservar a temperatura superior a 25 °C ( 25 °C).

HYLO FRESH® puede aplicarse hasta 6 meses después de su apertura.

No aplicar después de la fecha de caducidad ().

Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentaciones disponibles:

Colirio de 10 ml

Fecha de la información:

Marzo 2019

Fabricante ():

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
(Alemania)

Distribuidor:

BRILL PHARMA, S.L.
C/ Munner, 10
08022 Barcelona
(España)



Producto Sanitario

